

SMP AT - Tester digital de alcool

Cum funcționează:

Timpul de pornire este de 10 secunde, caz în care dispozitivul începe să numere în jos, de la 10 secunde la 0. În acest caz, se adaptează la temperatura exterioară. După ce se va face acest lucru, se va emite un semnal sonor și va începe să numere din nou în jos din 10 secunde. Apoi suflați sonda cu o cantitate mare de aer, uniform, nu prea tare, până când dispozitivul emite bipuri. După bip, valorile măsurate apar pe afișaj.

Afișează „ATENȚIE” dacă rezultatul este cuprins între 0,02% și 0,05%.

Afișează „PERICOL” când rezultatul atinge sau depășește 0,05%.

Interval de cântărire 0,00% până la 0,15% sau 0,0 până la 1,9 g l

Afișează „OFF” la 10 secunde după finalizarea măsurării, apoi se oprește automat după aproximativ 3 secunde.

Contorizare măsurare 10 sec

Funcționează cu 2 x baterii AAA.

Dimensiuni 11 cm x 7 cm x 2,5 cm.

Important: Nu fumați, nu mâncați și nu beți alcool timp de cel puțin 20 de minute înainte de începerea măsurării.

Informații tehnice:

- Sondă digitală de alcool cu alarmă sonoră
- Limitele de detectare: 0,00-0,19% BAC / 0,00-1,9 g / l
- Răspuns rapid și reutilizabilitate
- Funcție de oprire automată
- 5 lovituri de înlocuire
- Brelocul
- Funcționare: cu 2 baterii AAA (baterie nu este inclusă)

Referințe:

BAC: Concentrație de alcool în sânge

0,05% BAC: echivalent cu 0,05 g alcool la 100 ml unitate de sânge

Avertisment: Produsul nu este un dispozitiv certificat, deci valorile măsurate sunt informative numai !!

Importator;

S.M.Power Kft

2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15

www.smpower.eu